


吊上げ式・送気式に関わらず狭い体腔内での内視鏡手術用デバイス。
前頸筋を牽引して良好な視野を確保できますが、頸部以外の
様々な手術に応用可能です。

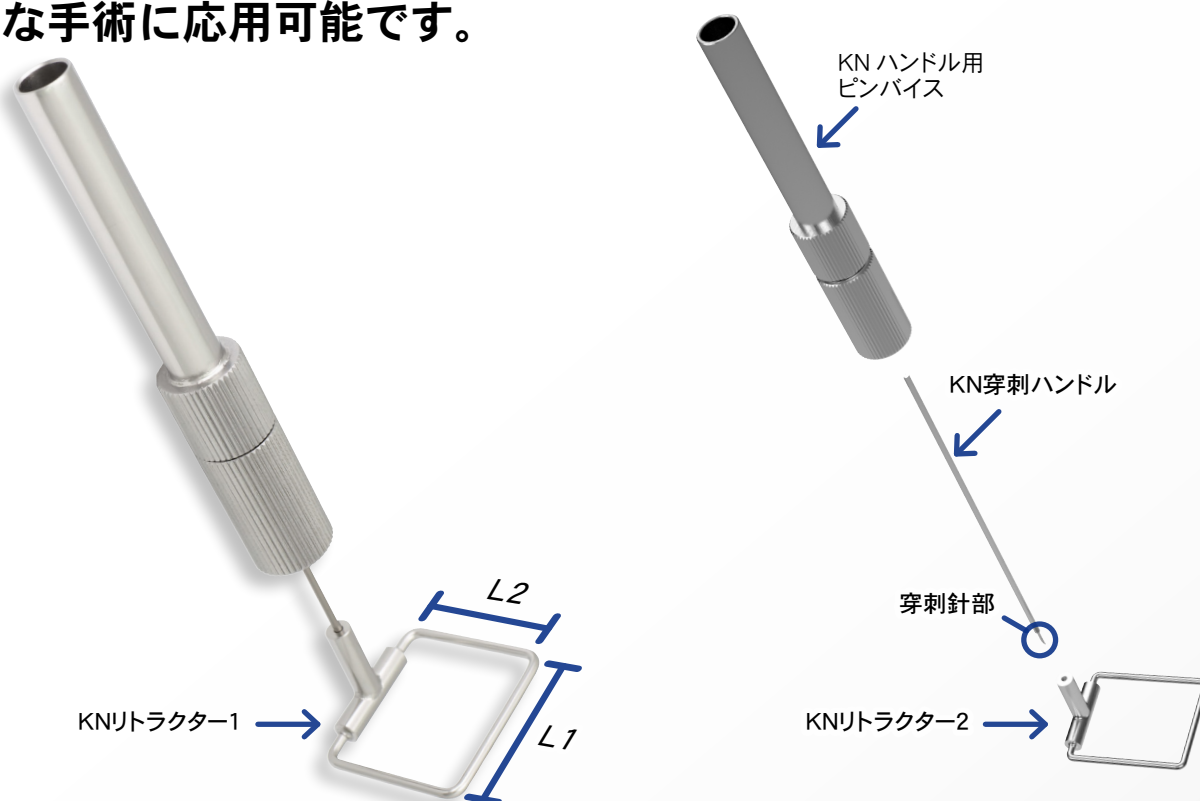

- KN 穿刺ハンドルの先端が穿刺針となっており、3cm程の小さな皮膚切開創から体内の所定位置に留置した KN リトラクター本体に穿刺針を体外から経皮貫通させ結合し、筋肉や血管などの組織を牽引します。
- 手術対象部位付近に皮膚切開を置くことなく、また筋肉等を切断することなく、狭い術野に有効なスペースを作ることが可能です。
- 甲状腺内視鏡手術を例にとると、腋窩や前胸部の小切開創から頸部の目的位置に KN リトラクター本体を移動させ KN 穿刺ハンドルを結合し、前頸筋を体外から牽引することで、狭い前頸部においても極めて良好な視野を確保できます。

製品番号	名 称	幅 (L1)	高さ (L2)	販売単位
TKZ-F2730	KN リトラクター (～以下セット内訳～)			1 セット
TKZ-F2731-1	KN リトラクター 1	35mm	30mm	1 個
TKZ-F2731-2	KN リトラクター 2	30mm	35mm	1 個
TKZ-F2732-1	KN 穿刺ハンドル 5 本入			1 袋
TKZ-F2733	KN ハンドル用ピンバイス			1 個